

## 1. Wat is de SkinFirmor RF?

De BABOR TECH SkinFirmor RF is geschikt voor de professionele behandeling van rimpels in het gebied rond de ogen, de mond en het voorhoofd.

Het apparaat werkt met radiofrequentietechnologie. Het gebruik van radiofrequentie heeft zijn oorsprong in de geneeskunde en wordt beschouwd als een stimulans voor celvernieuwing en collageensynthese. Met een speciaal handstuk wordt de energie van de radiofrequentie in het huidweefsel geleid om het weefsel op een gecontroleerde manier te verwarmen.

Deze opwarming, die als aangenaam wordt ervaren, bevordert de eigen regeneratiemechanismen van de huid.

Tegelijkertijd zorgt dit voor een samentrekking van de collageenvezels in het bindweefsel. Rimpels in het behandelde huidgebied zien er gladder uit en de huid ziet er steviger uit.

## 2. Hoe gaat een radiofrequentiebehandeling met de SkinFirmor RF in zijn werk?

Aan het begin van de behandeling wordt de huid grondig gereinigd.

Voorafgaand aan de radiofrequentiebehandeling wordt een speciale vochtinbrengende gel royaal aangebracht op de te behandelen huidgebieden. Het handstuk wordt vervolgens in gecontroleerde bewegingen over deze huidgebieden bewogen.

Voor de radiofrequentiebehandeling moet de klant zijn of haar contactlenzen uitdoen en zijn of haar hoortoestel uitschakelen.

## 3. Contra-indicaties

In sommige gevallen/situaties kan er een contra-indicatie zijn voor de radiofrequentiebehandeling die u wilt ondergaan of moeten we u informeren over mogelijke bijwerkingen van de gewenste radiofrequentiebehandeling.

Voor uw eigen veiligheid vragen wij u om de volgende informatie over uw gezondheidstoestand in een apart toelichtingsblad te verstrekken. Wij zullen dit in een persoonlijk gesprek met u doornemen.

## 4. Hoe reageert de huid in het behandelde gebied?

De huid reageert op de radiofrequentiebehandeling met een lichte tot intensieve roodheid, mogelijk ook met een lichte verbranding, tintelingen en een gevoel van spanning. In zeldzame gevallen kunnen ook zwellingen ontstaan. In de regel verdwijnen deze reacties uiterlijk na 1-2 dagen. Zichtbare vaten kunnen in eerste instantie intensiever zichtbaar zijn na de RF-behandeling, maar dit verdwijnt meestal na 1-2 uur.

## 5. Waar moet na de radiofrequentiebehandeling rekening mee worden gehouden?

Er worden optimale behandelingssuccessen bereikt als u op de dag van de behandeling zelf en op de dagen erna de volgende zaken vermijdt tot de roodheid volledig weggetrokken is:

- Sterk transpireren (saunabezoek)
- Sterke zon/zonnestudio
- Ontharing in de behandelde huidgebieden
- Zwembadbezoek (chloorwater/zeewater)

Nadat de roodheid is verdwijnen, kunt u alle activiteiten zoals gebruikelijk hervatten.

Vergeet niet dat intensieve blootstelling aan de zon de veroudering van de huid versnelt.

Met de radiofrequentiebehandeling hebt u gekozen voor een effectieve Anti-Aging-behandeling. Ondersteun en behoud het succes van deze behandeling/behandelingskuur door consistent zonnebrandcrème te gebruiken/het dragen van een zonnebril om het gebied rond de ogen te beschermen.

## **6. Verzorging na de radiofrequentiebehandeling**

De radiofrequentiebehandeling geeft uw huid impulsen om zich te vernieuwen voor een jeugdiger uitstraling.

Uw schoonheidsspecialiste stemt de behandeling/behandelingskuur individueel af op uw huidbeeld en uw persoonlijke wensen. Om optimale resultaten te behalen dient u de verzorgingsaanbevelingen voor thuis op te volgen

## **7. Aantal behandelingen**

Al na één RF-behandeling zijn er resultaten zichtbaar.

Voor een optimaal resultaat moeten radiofrequentiebehandelingen als kuur worden uitgevoerd, d.w.z. afhankelijk van de vorm van de rimpels en de weefseltoestand zijn er tussen de 4 en 6 behandelingen 2 maal per week nodig.